

# NAVODILA ZA UPORABO

- 1.** Masko s čistimi rokami povlečemo za elastični trak in se ob tem ne dotikamo drugih mask.
- 2.** Masko dobro razpremo, da nastane "žepek".
- 3.** Masko obrnemo tako, da je zaobljen rob zgoraj.
- 4.** Elastike namestimo za ušesa ter si masko povlečemo na nos in pod brado.



Maska je s strani UKC Ljubljana uradno potrjena kot ustrezna za zaščito splošne populacije.



Maska se lahko ročno opere pod toplo vodo, brez detergentov in je uporabna 2-3 dni.



Maske se **NE SME** odvreči med papirne odpadke, ali v odtok. Odvrže se jih v ostale odpadke!